



cologuard®

CÓMO ENVIAR SU KIT

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA ENVIAR SU KIT DE RECOLECCIÓN AL LABORATORIO A TRAVÉS DE UPS.

Si necesita ayuda, llámenos al 1-844-870-8870. Estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder a sus preguntas.

**EXACT
SCIENCES**
LABORATORIES

www.cologuard.com
Solo con receta médica

LBL-10034rev7

La prueba de detección de cáncer colorrectal Cologuard® es una marca registrada de Exact Sciences Corporation.

PREPARE SU KIT PARA EL ENVÍO



a.

- a. Localice la etiqueta de envío de UPS en la parte superior del kit.
- Las etiquetas de envío del kit pueden ser diferentes a las de la imagen.



b.

- b. Si la etiqueta de envío de UPS tiene una cinta desprendible verde, la debe quitar.
- Levante la esquina izquierda de la cinta desprendible y despréndala.
 - Levante la orilla inferior de la etiqueta y jálela hacia arriba.
 - Arranque la etiqueta superior del kit por la perforación.
 - Ahora podrá ver la etiqueta de envío.
 - Ya está listo para enviar su kit.
 - Continúe con el siguiente paso.



- c. Si la etiqueta de envío de UPS **no** tiene una cinta desprendible verde, entonces ya está listo para enviar su kit.

CÓMO ENVIAR SU KIT MEDIANTE UPS

Planifique recolectar su muestra cuando pueda enviarla a UPS en ese mismo día o al día siguiente.

- Agregue un recordatorio a su calendario o teléfono el día en que recolectará su muestra.
- Asegúrese de que ningún día feriado ni día domingo retrase su envío.

MANERAS DE ENVIAR SU KIT

Elija la opción de envío sin costo que le resulte más conveniente:

- Deje su kit en UPS. Visite Cologuard.com/UPS para ver sus opciones y horarios locales. Recuerde que algunos lugares están cerrados los domingos o días feriados.
- Solicite la recogida de UPS sin contacto. Llámenos al 1-844-870-8870 para obtener ayuda o visite Cologuard.com/UPS para programarlo por su cuenta.

Si vive en Puerto Rico o en un territorio de los Estados Unidos, o tiene preguntas sobre cómo enviar sus muestras, comuníquese con nosotros llamando al 1-844-870-8870.

CÓMO ALMACENAR SUS MUESTRAS ANTES DEL ENVÍO

Para almacenar las muestras antes de enviar la caja:

- Almacene sus muestras selladas en la caja a temperatura ambiente.
- Mantenga las muestras alejadas del calor y la luz solar directa.
- Mantenga las muestras fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el kit en posición vertical.

Cuando haya enviado las muestras al laboratorio, habrá terminado.

El proveedor de atención médica se comunicará con usted para darle el resultado.